



CoxaTrain

Stabilise et soulage la douleur de l'articulation de la hanche

Objectif

CoxaTrain est une orthèse de stabilisation qui a pour but de soulager la douleur liée à l'arthrose de la hanche ainsi que d'améliorer la mobilité


Indications

- Arthrose de la hanche (Kellgren-Lawrence 2-4)
- Déséquilibre musculaire la région lombaire, pelvienne et de la hanche
- Problèmes musculaires post-chirurgie de la hanche
- Coincement de l'articulation de la hanche
- Instabilité de l'articulation de la hanche
- Sensation d'instabilité


Applications et instructions



Aucun outil nécessaire pour l'ajustement de l'articulation pour un ajustement anatomique du patient

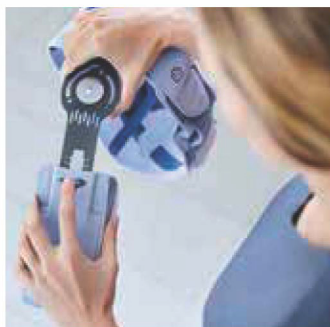

Hauteur ajustable du support de la cuisse sous l'articulation

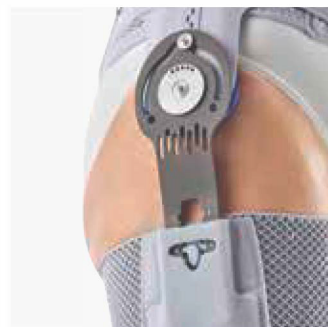

Stabilisation guidée de l'articulation latérale



Matériaux élastiques et système de courroies breveté

Bénéfices et mode d'action



Soulagement de la douleur en neutralisant le déséquilibre musculaire dans la région lombaire, pelvienne et de la hanche durant le mouvement ayant un effet positif sur la démarche:

- En stabilisant la région pelvienne et soulageant l'articulation sacro-iliaque
- Grâce à l'effet massage des coussins dorsaux de l'articulation SI sur la structure ligamentaire et des muscles adjacents
- Grâce au massage que procure le coussin du grand trochanter qui bouge de haut en bas en cercle à la marche
- Grâce au coussin de massage du moyen fessier à picots ciblés



Avantages

- Procure une stabilisation grâce au guidage de l'articulation latérale
- Haut niveau d'adhésion du patient (A)
- Facile à enfiler sans trop d'efforts. Merci aux courroies et à leurs pochettes

Faits et mesures

STYLE

Support pelvien

6 grandeurs, même version pour le côté gauche et droit

Support de la cuisse

3 grandeurs et différentes versions pour le côté gauche et droit

Articulation

Pour sélectionner l'articulation (court/long), veuillez vous référer à la taille du patient

S = court <1,70m

L = long >1,70m

Note: Dans des cas spécifiques, il est possible que la version courte (S) soit mieux ajustée malgré une mesure qui dicterait la version longue ou l'inverse.

Les avantages Bauerfeind


Pour une plus grande efficacité à tous les jours

- + Facile à manipuler
- + Matériaux doux pour la peau et qui respirent
- + Ajustement sans outil

Charte de mesures/codes des pièces CoxaTrain

Support pelvien

Grandeurs	1	2	3	4	5	6
Circonférences pelviennes (cm)	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	135-145
Code 122 2581 1080 00°	1	2	3	4	5	6

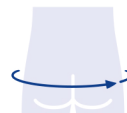

° = grandeurs (1-6)

Support pelvien


Grandeurs	1	2	3	
Circonférences (au centre) (cm)	43-53	53-63	63-73	
Code 122 2582 1080 +0°	1	2	3	



+ = côté (6) droit, (7) gauche (1-6) ° = taille (1-3)

Articulation

Grandeurs	Court	Long	
Hauteur (cm)	< 170 cm	> 170 cm	
Code 122 2584 100# 000	1	2	

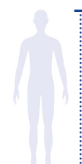

= grandeur (1) court, (2) long

Pièces de rechanges



Capsule protectrice

129 2583 1000 000



Coussin muscle moyen fessier

129 2585 1000 000



Coussins de l'articulation SI

119 8416 0000 000



2x tiges de limitations

129 2587 1000 000



Coussins du grand trochanter

129 2586 1000 000



Articulation et capsule

129 2588 1001 000 (court)

129 2588 1002 000 (long)

Trois degrés de restrictions
du mouvement de la
hanche en option
(60°, 75°, 90°)

Galien *

**CANADA
GALIEN**

2017 Rue Cunard
H7S 2N1
Laval, Quebec

Bureau (450) 629-9889
Bureau sans frais +1 877 629-9889
Fax local +1 (450) 629-9895
Fax sans frais +1 877 629-9895
info@galiengroup.com